

Quidel™ QuickVue 在家非处方新冠病毒检测说明

该测试已获得美国食品和药物管理局 (FDA) 的紧急使用授权 (EUA)，通过从 14 岁或以上的人士身上自行收集的直接前鼻 (鼻孔) 拭子样本，可用于非处方家庭新冠检测。该测试也授权，成人可从 2 岁或 2 岁以上儿童身上收集的前鼻拭子样本，用于非处方家庭新冠检测使用。

测试前，请用肥皂和水或用洗手液洗手。确保你的手完全擦干。

- **第一步：找到测试材料套装**
 - 试管（管内有液体）
 - 试管架
 - 棉签拭子
 - 试纸
- **第二步：将试管放在试管架里**
 - 取下试管上的盖子
 - 将试管放回试管架中
- **第三步：擦拭鼻孔**
 - 从棉签包装纸中取出棉签（不要触摸棉签的头部）
 - 将棉签拭子轻轻插入鼻孔 $\frac{1}{2}$ 至 $\frac{3}{4}$ 英寸处
 - 用棉签围绕鼻孔内壁以圆周运动用力擦拭至少 4 次。
 - 用同一棉签拭子在另一个鼻孔重复同样操作
- **第四步：将棉签拭子放入试管中**
 - 马上将棉签放入试管内的液体中（确保它接触到试管底部）
 - 把棉签搅转 3 至 4 次
 - 将棉签拭子放在溶液中一分钟
- **第五步：从试管中取出棉签**
 - 一分钟后，通过用棉签拭子头磨擦试管内壁，以尽可能多地挤出液体，然后将棉签拭子从试管中取出
 - 将棉签丢进垃圾桶
- **第六步：打开试纸条**
 - 在间隙处小心打开试纸袋，照指示拿好试纸条
- **第七步：将试纸条放入试管内**
 - 将试纸条放入试管中，试纸条上的箭头朝下
 - 把试纸条放在试管中满十分钟，不要处理或取出试纸条
- **第八步：从试管中取出试纸条**
 - 10 分钟后，从试管中取出试纸
 - 将试纸条放在平坦的表面上

阳性测试结果将必须同时显示一条蓝色线和一条粉色线。蓝色线是对照线，粉线是检测线。

阴性测试结果将显示一条蓝色线，但没有粉色线。

无效的测试结果将不显示任何线条或仅显示粉色线条。如果需要重新测试，那么应使用新试管、新棉签拭子和新试纸从头开始测试。

测试材料可扔进垃圾桶。完成步骤后请洗手或使用洗手液。

如果要观看测试的演示视频，请访问：https://quickvueathome.com/#video_howitworks

如需更多关于 Quidel™ QuickVue 在家非处方新冠病毒检测信息，请访问：<https://quickvueathome.com/>