

雅培 BinaxNOW™ COVID-19 家用快速抗原测试使用说明

(无需照料房间)

本测试已由美国食品和药物管理局（FDA）根据紧急使用授权（EUA）供 4 岁及以上的学生使用。

本测试应该在家里通过远程医疗会议完成。测试将通过一个设备（电脑、手机等）进入[维吉尼亚州 eMed 网页](#)开始。

[如何测试视频指南](#)

如何使用：

- 只有在 eMed 远程医疗会议开始后，在认证指导人员的指导下，才可以打开测试包。
- 登录[维吉尼亚州 eMed 网页](#)
- 使用 NAVICA™应用程序凭证登录，开始使用 eMed 进行测试
- 点击“开始测试”
- 完成核对清单
- 你将被连接到一个认证指导
- 打开测试包
- 出示测试卡，扫描二维码
- 打开测试卡，确保认证指导可以看到整个过程
- 取下滴管瓶盖
- 将 6 滴引导剂放入顶部的孔中
- 打开棉签包装，将棉签拿出来
- 将棉签的吸收头插入鼻孔中
- 以转圈的方式在鼻孔内侧刷 5 次
- 在另一个鼻孔里重复上述做法
- 将棉签头插入测试卡的底孔，向上推，直到填满顶孔
- 转动棉签 3 次
- 剥去粘性衬垫
- 关闭卡片并密封
- 得到结果需要 15 分钟
- 测试者将收到一份测试结果的电子副本

如果结果呈阳性，学生需要待在家里。请联系您的医疗保健提供者进行后续护理。请通知您孩子的学校。被诊断患有新冠疾病的学生不得返回学校，直到：

- 自学生第一次出现症状以来，至少已有五（5）天，并且
- 学生必须在没有服用退烧药的情况下在 24 小时内没有发烧，并且
- 学生的症状正在改善。