

Abbott's BinaxNOW™ 코로나-19 항원 자가 검사 사용 설명서

(격리실에서 가정으로 보내지는 경우)

여러분의 자녀가 코로나-19 와 일치하는 증세를 보이기에 여러분은 15 분 기다려 결과를 얻는 BinaxNOW™ 코로나-19 항원 자가 검사 키트를 사용하는 것입니다. 이 검사는 4 세 이상의 학생들이 사용할 수 있도록 긴급 사용 승인 (EUA)에 따라 식품 의약국 (FDA)의 승인을 받았습니다.

이 검사는 반드시 원격 의료 세션을 통해 가정에서 완료해야 합니다. 사용자들은 자신의 기기 (컴퓨터, 전화기, 등등)를 통해 [버지니아의 eMed 웹페이지](#)를 방문하여 이 검사를 시작할 것입니다.

[검사 방법에 관한 비디오 안내](#)

사용 방법:

- eMed 원격 의료 세션에서 공인 안내인 (Certified Guide)의 지시가 있을 때까지 절대 검사 키트를 열지 말 것
- [버지니아의 eMed 웹페이지](#)에 접속할 것
- eMed 를 통해 검사를 시작하기 위해 NAVICA™ 앱 자격 인증 (사용자 아이디 및 비밀번호)을 사용하여 로그인할 것
- “Start Testing (검사 시작)” 버튼을 클릭할 것
- 점검 사항을 작성할 것
- 여러분은 공인 안내인 (Certified Guide)에게 연결될 것임
- 검사 키트를 열 것
- 검사 카드를 보이고 QR 코드를 스캔할 것
- 검사 카드를 열고 공인 안내인이 검사 과정을 볼 수 있도록 화면을 조정할 것
- 용액통 뚜껑을 열 것
- 상단부 구멍에 용액 6 방울을 떨어트릴 것
- 면봉이 들어있는 패키지를 열고 면봉을 꺼낼 것
- 면봉의 끝을 코 안쪽에 넣을 것
- 코 안쪽에서 원을 그리며 5 회 정도 문지를 것
- 같은 면봉을 다른 쪽 코에도 넣고 똑같이 반복할 것
- 검사 카드의 하단부에 있는 구멍에 면봉을 삽입하여 면봉이 상단부 구멍을 채울 때까지 밀어 넣을 것
- 면봉을 3 회 돌릴 것
- 접착 라이너를 벗겨낼 것
- 카드를 덮어 봉할 것
- 결과를 위해 15 분간 기다릴 것
- 검사를 한 각 개인은 검사 결과의 전자 사본을 받게 될 것임

만약 학생의 검사 결과가 양성이라면, 학생은 가정에 머물러야 합니다. 후속 조치를 위해 여러분의 의료 서비스 제공자에게 연락하고 자녀의 학교에도 통보하기 바랍니다. 코로나-19 로 진단받은 학생들은 다음 사항이 충족될 때까지 학교에 복귀할 수 없습니다:

- 학생이 처음 증상을 보인 후 최소 5 일이 지났음 **그리고**
- 학생은 해열제 사용 없이 24 시간 동안 열이 없음 **그리고**
- 학생의 증상이 호전되고 있음

만약 학생의 결과가 음성이라면, 학생은 다음 모든 사항이 충족될 때 학교에 복귀할 수 있습니다:

- 해열제 사용 없이 24 시간 동안 열이 없음 **그리고**
- 학생의 증상이 호전되고 있음 **그리고**
- 코로나-19 검사 증서 – 다음을 필수로 제출해야 함
 - BinaxNOW 검사 결과의 전자 사본 제출
 - [FCPS 코로나-19 항원 자가 검사의 음성 결과에 대한 학부모/보호자 확인서](#)를 작성하여 제출